

Ficha Técnica

(RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO)

Askina® Barrier Cream

Creme protector hidratante

1. DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO QUALITATIVA

O Creme de barreira Askina® Barrier Cream é um creme concentrado de cor branca que quando aplicado à pele, forma uma camada de proteção e hidrata a pele seca.

Composição:

Água purificada, Etilhexil isononanoato, Hexametil disiloxano, Poli-isobutileno, Copolímero de PVP/Eicoseno, Copolímero de hidroxietil acrilato/acrilodimetil taurato de sódio, Butileno glicol, Fosfato de oiet-3, Fenoxietanol, Copolímero de estireno hidrogenado/isopreno, Alantoína, Carbómero, Trietanolamina, Metilparabeno, Propilparabeno, EDTA disódico

Isento de látex

2. MECANISMO DE AÇÃO

O creme de barreira Askina funciona como uma barreira protetora e hidratante.

3. INDICAÇÕES

O creme de barreira Askina está indicado para utilização em peles intactas e é utilizado:

- ✓ Contra a maceração causada pela incontinência ou fluidos corporais
- ✓ Para proteger peles sensíveis e frágeis e peles extremamente secas, incluindo as áreas de periferidas
- ✓ Para prevenir a irritação cutânea

4. CONTRAINDICAÇÕES, PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

O creme de barreira Askina® Barrier Cream não deve ser utilizado em peles infetadas. Se o problema cutâneo sofrer um agravamento ou não melhorar no espaço de 7 dias, consulte um médico.

Evite o contacto com os olhos.

Exclusivamente para uso externo; procure ajuda médica em caso de ingestão.

A utilização de outros produtos de barreira, cremes, pomadas ou loções pode diminuir a eficácia do creme de barreira Askina.



Ficha Técnica

(RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO)

O creme de barreira Askina® Barrier Cream não deve ser utilizado quando existir uma sensibilidade alérgica conhecida aos componentes.

O creme de barreira Askina® Barrier Cream pode aumentar a aderência de determinados produtos adesivos.

Não utilizar no caso de a embalagem estar danificada ou aberta.

5. EFEITOS ADVERSOS

Quando utilizado corretamente não são conhecidos efeitos adversos.

6. MODO DE UTILIZAÇÃO

O Askina® Barrier Cream é muito fácil de aplicar não requerendo técnica ou equipamento especiais. O tempo para nova aplicação dependerá da frequência da limpeza e das mudanças do penso secundário.

Numa pele limpa com frequência, pode haver necessidade de uma nova aplicação diariamente, mas nos casos em que a limpeza é menos frequente, o intervalo pode ser reduzido para 2 ou 3 dias. Limpe a pele devidamente. Seque bem a pele antes de aplicar o Creme Protector Askina®. Espalhe o Creme Protector Askina® Barrier Cream numa camada fina para cobrir toda a zona afetada. Se o Askina® Barrier Cream for aplicado numa área de contacto de pele com pele, ou de prega cutânea, alise suavemente a pele de forma a poder aplicar uniformemente a película. Permita que a película seque antes de deixar a pele retomar a posição normal. Se sentir a pele oleosa, significa que foi aplicada uma quantidade excessiva de creme. Remova o excesso de creme com toalhetes. O Askina® Barrier Cream pode ser retirado utilizando a maior parte dos produtos de remoção de adesivos médicos conforme as instruções.

7. INFORMAÇÕES ESPECIAIS

Classificação do Dispositivo Médico: Classe I não estéril

Directiva comunitária: 93/42/CEE

Fabricado por:

Avery Dennison Medical Ltd., IDA Business, Ballinalee Road, Longford, N39 DX73 – Irlanda

Distribuído por:

B. Braun Medical, Unipessoal Lda.

Estrada Consiglieri Pedroso, n° 80

Queluz de Baixo

2730-053 Barcarena

Ficha Técnica

(RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO)

8. ARMAZENAMENTO/ESTERILIZAÇÃO/SÍMBOLOS NA ROTULAGEM



= Código de lote



= Referência do Produto



= Data Limite de Utilização



= Fabricante



= Data de fabrico



= Consultar instruções de utilização



= Marcação CE



= Reciclável



= Não utilizar se a embalagem estiver danificada



= Manter longe da luz solar



= Manter seco



= Distribuidor

Ficha Técnica

(RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO)

9. PRAZO DE VALIDADE

3 anos

10. APRESENTAÇÃO

Referência	Medida/Volume	Unidade de venda
5038	92 g	24 un/cx