

Foto do Produto	Informação do Produto
	Designação: Almofada Anti escaras ErgoConfort Categoria: Anti- escaras Classe: Classe I Referência: GT110068 GT110070 Linha: Cadeirão Cor: Azul Tipo de Artigo: Almofada Modular Anti-escaras Medida S, M Comprimento costas: 71 cm Comprimento assento- 56 cm L: 56 cm A: 8,5 cm L, XL Comprimento costas: 82,5 cm Comprimento assento- 56 cm L: 56 cm A: 8,5 cm NPDM: Y033303
FINALIDADE MÉDICA	
Prevenção de escaras e suporte lombar.	
Instruções de Uso	
O dispositivo deve ser colocado no cadeirão e deve ajustar se o sistema de segurança composto por cintos de segurança laterais e sistema de fecho nas costas do cadeirão.	
COMPOSIÇÃO	
Enchimento: Fibras Siliconizadas Capa: 100% poliéster impermeável	
PREVENÇÃO DE DANOS	
PERIGO DE CONTAMINAÇÃO - É recomendado cuidado especial na utilização de seringas, objetos pontiagudos, bisturis ou outros objetos, perto do produto, dado que estes podem rasgar ou perfurar a capa e o núcleo; - A entrada de fluídos biológicos e a contaminação do produto nestas condições representam perigo para o utilizador;	EVITE - O uso de joias, especialmente anéis com pedras, ou com extremidades pontiagudas; CUIDADOS ESPECIAIS - Ter atenção ao contacto com o produto durante a utilização de equipamentos médicos tais como acessórios de apoio, placas de transferência, ou outros, de forma a não exercer pressão ou fricção sob a capa/núcleo, para evitar deformações ou rasgões; - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas;
INIBIÇÃO DE USO/ELIMINAÇÃO	
Inibição de Uso O produto deve ser imediatamente inutilizado quando: - São visíveis os seguintes danos ou anomalias: sinais de desgaste, rasgões, furos; - Ocorrer contaminação do núcleo por fluídos biológicos virais; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção, quer para o utilizador, quer para o cuidador.	Eliminação Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco fechado e selado e colocado em contentor municipal. Eliminação de Produto quando Contaminado Proceder à eliminação sujeita aos requisitos específicos definidos pela Unidade de Saúde em causa tendo em vista a prevenção de infeções; * No caso dos utilizadores particulares estes devem contactar qualquer empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos;

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO - Proibida a exposição solar; - Não armazenar o produto junto de equipamentos de aquecimento como radiadores, esquentadores, aquecedores; - Não armazenar o produto em contato direto com o chão ou qualquer superfície desprotegida; CUIDADOS NO TRANSPORTE - Não empilhar o produto na vertical; - Não armazenar o produto em contato direto com o chão ou qualquer superfície desprotegida; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;	RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO DO PRODUTO - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; - Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
CERTIFICAÇÕES -----	Advertências críticas/ contraindicações A almofada dispõe de um sistema de segurança que fixa a almofada ao cadeirão para evitar o seu deslizamento. Deve ser garantir se que o sistema de segurança deve estar ajustado para prevenir a queda do utilizador por deslizamento.
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO Este produto está protegido por uma embalagem selada e só deverá ser aberto aquando a sua utilização, não sendo necessária qualquer ação secundária para a sua utilização.	
Instruções de Lavagem Lavagem manual; Não secar na máquina; Não passar a ferro; Não branquear, nem usar líquidos abrasivos;	