

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO – GT130009

Imagem	
Fabricante	Equalperspective Lda Rua de Perlinhas, 566 4435 – 3939 Rio Tinto; Telefone: +351 220 739 702 www.geritex.pt geral@geritex.pt Telf/ Fax: 220 739 702 NIF: 514998601
Finalidade Médica	Indicado para a prevenção de escaras na região sacrococcígea e perineal; Alívio de dor/pressão sob escaras até Grau II na região sacrococcígea e perineal
Cor	Azul
Referência	GT130009
Dimensões	Ø37x12
Prevenção de Danos	É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto. - Não colocar objetos pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes; - Ter cuidado especial durante a utilização de equipamentos médicos tais como monitores, acessórios de apoio, barreiras, placas de transferência, etc. - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.
Composição/ Revestimento	Núcleo: Poliuretano Capa: Tela Biopruf®
Instruções de Limpeza	A capa deve ser limpa regularmente em conformidade com o protocolo de desinfecção em vigor nas respetivas instituições. A capa deve ser lavada de acordo com as instruções que constam da Tab. 1
Integridade do Produto/ Inibição de Uso	A almofada deve ser imediatamente inutilizada quando se verificarem: - Danos ou anomalias ao nível da capa; - Sinais de contaminação do núcleo; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção quer para o paciente e quer para o cuidador.
Eliminação	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, exceto : - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluidos corporais que representem perigo de contágio;
Contraindicações	Úlceras de pressão na zona do coxís.
Certificações	Núcleo: ISO 845, 2439, 1798, 3386/1, ASTM D 3574, 1856, 3385 Capa: Bio-Pruf® Certificado pela ISO 811
Garantias/ Devoluções	<i>Garantias</i> Os produtos fabricados possuem um prazo da garantia que expira ao fim de 6 (seis) meses após a entrega, uma vez que as transações não decorrem diretamente com o consumidor final. <i>Devoluções</i> - Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios

	fornechos. - Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no acto de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador.
Recomendações de Inspeção	As almofadas deverão ser verificadas regularmente de forma a garantir a manutenção da sua aptidão ao uso clínico eficaz e sem riscos de infeção para o paciente ou para o cuidador. A inspeção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador da almofada. <i>Avaliação de integridade da CAPA:</i> - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluidos; <i>Avaliação de integridade do NÚCLEO:</i> - Efetuar pressão ao longo de diversos pontos da superfície para detetar eventuais sinais de fadiga do produto; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
Cuidados no armazenamento/ Transporte	- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;

Tabela 1 –Instruções de Limpeza da Capa



Lavável até 95



Não lavar com lixívia

Limpeza a Seco
Sem restriçõesTodos os solventes
Exceto Tricloroetileno