

Foto do Produto	Informação do Produto
	Designação: Sobre-Colchão Hospitalar Viscoelástico com capa Biopruf® Categoria: Anti escaras Classe: Classe I Referências: GT160067 GT160068 Linha: Cama Cor: Azul Tipo de Artigo: Colchão Tamanho: Único Medida: 190 x 90 x 6 200 x 160 x 6 NPDM: Y033306
FINALIDADE MÉDICA	
Distribuir melhor a pressão nos pontos de apoio do corpo do doente	
INSTRUÇÕES DE USO	
O dispositivo deve ser colocado em cima de um colchão de cama hospitalar	
COMPOSIÇÃO	
CAPA 100% poliéster impermeável - Biopruf®	NÚCLEO 6 cm espuma viscoelástica D45 (45 kg/m³)
CARACTERÍSTICAS DO BIOPRUF®	
Antibacteriano * Antifúngico * Antialérgico * * Assegurados quando estão garantidas as condições de utilização do colchão sem exposição a elementos e/ou ambientes contaminados.	
PREVENÇÃO DE DANOS	
PERIGO DE CONTAMINAÇÃO - É recomendado cuidado especial na utilização de seringas, objetos pontiagudos, bisturis ou outros objetos, perto do produto, dado que estes podem rasgar ou perfurar a capa e o núcleo; - A entrada de fluídos biológicos e a contaminação do produto nestas condições representam perigo para o utilizador;	EVITE - O uso de joias, especialmente anéis com pedras, ou com extremidades pontiagudas; CUIDADOS ESPECIAIS - Ter atenção ao contacto com o produto durante a utilização de equipamentos médicos tais como acessórios de apoio, placas de transferência, ou outros, de forma a não exercer pressão ou fricção sob a capa/núcleo, para evitar deformações ou rasgões; - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas;
INIBIÇÃO DE USO/ELIMINAÇÃO	
INIBIÇÃO DE USO O produto deve ser imediatamente inutilizado quando: - São visíveis os seguintes danos ou anomalias: sinais de desgaste, rasgões, furos; - Ocorrer contaminação do núcleo por fluídos biológicos virais; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção, quer para o utilizador, quer para o cuidador.	ELIMINAÇÃO Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco fechado e selado e colocado em contentor municipal. ELIMINAÇÃO DE PRODUTO QUANDO CONTAMINADO Proceder à eliminação sujeita aos requisitos específicos definidos pela Unidade de Saúde em causa tendo em vista a prevenção de infeções; * No caso dos utilizadores particulares estes devem contactar qualquer empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro

	integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos;
CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO - Proibida a exposição solar; - Não armazenar o produto junto de equipamentos de aquecimento como radiadores, esquentadores, aquecedores; - Não armazenar o produto em contato direto com o chão ou qualquer superfície desprotegida; CUIDADOS NO TRANSPORTE - Não empilhar o produto na vertical; - Não armazenar o produto em contato direto com o chão ou qualquer superfície desprotegida; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;	RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO DO PRODUTO - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; - Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; - Verificar visualmente se existem eventuais deformações no produto;
CERTIFICAÇÕES UNE EN ISO 868; 527-3;	CONTRA- INDICAÇÕES Não são conhecidas contra-indicações.
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO Este produto está protegido por uma embalagem selada e só deverá ser aberto aquando a sua utilização, não sendo necessária qualquer ação secundária para a sua utilização.	
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM Lavável até 95°; Não passar a ferro; Não branquear, nem usar líquidos abrasivos; esterilizável em autoclave até 130°;	