

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÃO

PRODUTO	Cinto de Segurança Abdominal para Acamados – Basic Line	COR	Azul
REFERÊNCIA	GT180008	CLASSE DM	I
COMPOSIÇÃO	10% poliéster / 30% algodão 30% poliéster / 30% poliamida	TAMANHO(S)	Único
		DIMENSÕES	86 x 20 cm (Cinto Abdominal 115 x 20 cm)
PESO MÁX UTILIZADOR	N. Aplicável	NPDM	M030599

COMPONENTES

AJUSTÁVEL	SIM	X	NÃO	
CAPA PROTETORA	SIM		NÃO	X
TIPO DE EMBALAGEM	PLÁSTICO	X	CARTÃO	



ESPECIFICAÇÕES

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	Deve ter especial cuidado ao usar e guardar este produto, afastando-o de chamas ou fontes de calor; O produto deve ser desinfetado antes de cada reutilização.
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM	Lavável manual até 30°; Não secar na máquina; passar a ferro a baixa temperatura (Max. 150°); Não secar ao sol.
ETIQUETA LAVAGEM	   

AVISOS E PRECAUÇÕES

SISTEMA DE FECHO	Este dispositivo deve ser preso através das fitas , na parte lateral/ baixo da cama. Certifique-se que o utente fica devidamente preso, sem sufocar.	
CONTRAINDICAÇÕES	Este produto é contraindicado em caso de feridas expostas, edemas, queimaduras, lacerações, e outro tipo de lesões que possam comprometer a saúde/estabilidade do utilizador deste produto.	
ELIMINAÇÃO	No final de vida útil este produto deve ser depositado em saco fechado e selado em contentor municipal.	
CLASSIFICAÇÃO	Resíduo Não Valorizável	
CONTAMINAÇÃO	INSTITUIÇÕES/UNIDADES DE SAÚDE Proceder de acordo com normas e regras em vigor na Unidade de Saúde.	PARTICULARES Contactar empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos.
INSPEÇÃO DO PRODUTO	Antes de utilizar este produto VERIFICAR sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; todas as costuras; coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; eventuais deformações no produto.	
RECOMENDAÇÕES	É recomendado cuidado especial na utilização de seringas, objetos pontiagudos, bisturis, outros objetos perfurantes.	
INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO	O produto deve ser imediatamente inutilizado quando possa ocorrer desgaste no tecido que coloque em causa a sua integridade; quando apresentar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; quando apresentar desgaste e/ou rompimento das costuras; quando apresentar coloração/ manchas ou sinais de infiltração de fluídos.	
GARANTIAS	DEFEITO DE FABRICO O presente artigo tem uma garantia de dois (2) anos contra defeitos de fabrico.	DANOS A Equalperspective Lda reserva-se ao direito de avaliar se o(s) defeito(s) ou a(s) anomalia (s) decorre da má utilização ou mau manuseamento do produto.