


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO – GT180009

Imagem	
Fabricante	Equalperspective Lda Rua de Perlinhas, 566 4435 – 393 Rio Tinto; www.geritex.pt geral@geritex.pt Telf/ Fax: 220 739 702 NIF: 514998601
Finalidade Médica	Colete de segurança para cadeira de rodas de faixa abdominal, indicado para utentes com ausência de postura e/ou equilíbrio.
Cor	Azul
Referência	GT180009
Dimensões	<i>Cinto</i> 146x28 <i>Fita Extensível</i> Máx 70 cm
Descrição	Cinto abdominal para cadeira de rodas– Basic Line
Utilização	Utentes moderadamente agitados ou com comportamento agressivo; Proteção dos utentes restringindo movimentos evitando possíveis quedas da cadeira de rodas; Incremento de postura através de fixação da zona abdominal á cadeira de rodas.
Prevenção de Danos	É recomendado cuidado especial para evitar perfuração do produto, evitando a entrada de fluidos e por conseguinte a contaminação do enchimento do produto. - Não colocar objecto pontiagudos como agulhas hipodérmicas, bisturis, etc. sobre o produto; - Evitar o uso de joias, especialmente anéis com pedras grandes; - Não lavar com produtos de limpeza e esponjas abrasivas.
Composição/ Revestimento	Poliéster Velur Fita: 100% Poliéster Molas: Plástico
Instruções de Limpeza	A capa deve ser lavada de acordo com as instruções que constam da Tab. 1
Integridade do Produto/ Inibição de Uso	O Produto deve ser imediatamente inutilizado quando se verificarem: - Danos ou anomalias ao nível da capa; - Sinais de contaminação do núcleo; O não cumprimento destes procedimentos acarreta riscos significativos de infeção quer para o paciente e quer para o cuidador.
Eliminação	Este produto é considerado um resíduo não valorizável. No final de vida útil deve ser depositado em saco e colocado em contentor municipal, exceto : - Produto contaminado por resíduos como sangue e fluídos corporais que representem perigo de contágio;
Contraindicações	Contraindicado em pacientes alérgicos a poliéster. Não aplicar diretamente sobre feridas.

Certificações	UNE 20344.2004
Garantias/ Devoluções	<i>Garantias</i> Os produtos fabricados possuem um prazo da garantia que expira ao fim de 6 (seis) meses após a entrega, uma vez que as transacções não decorrem directamente com o consumidor final. <i>Devoluções</i> - Caso decida exercer o direito de devolução dos produtos comprados, a Pacheco e Filhos tem o direito de não aceitar a devolução de produtos que são devolvidos sem a etiqueta ou selo correspondente ou que foram alterados em relação ao seu estado original ou danificados. - Os produtos devem ser devolvidos na sua embalagem original com todos os manuais e acessórios fornecidos. - Independentemente do transportador, deverá sempre verificar, no acto de entrega, se a encomenda não apresenta sinais de violação e aparenta estar em boas condições. Se isso acontecer, reclame de imediato e por escrito junto do transportador.
Recomendações de Inspeção	A inspecção deverá ser realizada semanalmente ou sempre que um novo paciente venha a ser utilizador do Produto. <i>Avaliação de integridade da CAPA:</i> - Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; - Verificar todas as costuras; Verificar coloração/ manchas ou infiltração de fluídos;
Cuidados no armazenamento/ Transporte	- Proibida a exposição solar; - Não armazenar os produtos junto a dispositivos de aquecimento; - Não armazenar os produtos em contato direto com o chão; - Não colocar o produto empilhado na vertical; - Não armazenar o produto em ambientes sujeitos à acumulação de partículas; - Proteger o produto de partículas que possibilitem a acumulação de pó;

Tabela 1 –Instruções de Limpeza da Capa

Não usar lixívia

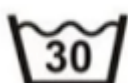

Lavagem à mão até 30 °



Não passar a ferro



Não limpar a seco