

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÃO			
PRODUTO	Colete de Segurança Com Pélvico - Cadeirão	COR	Azul
REFERÊNCIA	GT180039	CLASSE DM	I
PESO PRODUTO ¹ (Gramas)	500	NPDM	Y122406
MEDIDAS	36 x 29/48 cm (Pélvico 38 cm, extensível até 150 cm / Cintura extensível até 150 cm)	GNDM	13356
COMPOSIÇÃO	Interior: 10 mm (pasta de espuma 100% poliéster)		
	Capa: 62% PVC / 38% poliéster		
PESO MÁX UTILIZADOR (Kg)	< 85 Kg		
EMBALAGEM ² (Dimensões)	35 x 21 x 7		
TIPO DE EMBALAGEM	Plástico com fecho zipp		

ESPECIFICAÇÕES	
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO	INSTRUÇÕES DE LAVAGEM
Usar e guardar em posição horizontal, afastado de chamas ou fontes de calor Desinfetar antes de cada reutilização	Lavável na máquina até 40° Não secar na máquina Não passar a ferro Não secar ao sol

¹ O peso pode variar até 100 gramas

AVISOS E PRECAUÇÕES		
PRECAUÇÕES	O produto não deve ser utilizado sem a vigilância de um auxiliar, cuidador e/ou profissional de saúde, quando utilizador se encontra muito agitado;	
ELIMINAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	Resíduo Não Valorizável.
	No final de vida útil este produto deve ser depositado em saco fechado em contentor municipal.	
CONTAMINAÇÃO	INSTITUIÇÕES/UNIDADES DE SAÚDE PARTICULARES	
	Proceder de acordo com normas e regras em vigor na Unidade de Saúde.	Contactar empresa de gestão de resíduos hospitalares ou centro integrado de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos.
INSPEÇÃO	Verificar sinais de rasgamento, fissuras ou perfurações; todas as costuras; coloração/ manchas ou infiltração de fluídos; eventuais deformações no produto.	
RECOMENDAÇÕES	É recomendado cuidado especial na utilização de: seringas, objetos pontiagudos, bisturis ou outros objetos.	
INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO	O produto deve ser imediatamente inutilizado quando ocorre a entrada de fluídos biológicos e há probabilidade de contaminação do produto, representando perigo para o utilizador e/ ou quando são visíveis danos ou anomalias como sinais de desgaste, rasgões, furos.	