

RESUMO DE CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

VARIHESIVE® HIDROGEL

Gel de Hidrocolóide

Descrição do Produto

Varihesive® Hidrogel é um gel estéril composto por hidrocolóides (pectina, carboximetilcelulose sódica) num veículo transparente e viscoso.

Propriedades

VariHesive® Hidrogel cria no leito da ferida um meio húmido que hidrata os tecidos necrosados e promove o desbridamento autolítico.

Este meio húmido vai também estimular a granulação e favorecer a epitelização

Modo de actuação

VariHesive® Hidrogel é composto por água (cerca de 80%), hidrocolóides e por um excipiente humectante (propilenoglicol). Estes elementos fazem deste gel um produto ideal para hidratar tecidos desvitalizados, sem provocar danos ao leito da ferida, ou aos tecidos frágeis de granulação.

Indicações

O Varihesive® Hidrogel está indicado no tratamento de lesões de espessura parcial ou total como úlceras de perna e úlceras de pressão. O gel produz um meio húmido que ajuda a promover o processo autolítico natural para o desbridamento.

Contra-indicações

O Varihesive® Hidrogel não deverá ser utilizado em pacientes com sensibilidade conhecida ao gel ou a alguns dos seus componentes.

Instruções de Uso

Limpe cuidadosamente a lesão com água estéril, soro fisiológico ou de acordo com a prática clínica normal. Seque a pele circundante.

Retire a tampa do tubo e destaque o aro branco de segurança. Recoloque a tampa de modo a perfurar a membrana do tubo. Aplique Varihesive® Hidrogel directamente sobre a lesão. O aplicador estéril pode ser adaptado ao tubo de modo a facilitar a aplicação em lesões profundas. Não preencha a lesão acima do nível da pele circundante. Poderá ser criado um meio ideal para a cicatrização, cobrindo a ferida com um apósito que retenha a humidade tal como o Varihesive® Gel Control ou o Varihesive® Extra Fino.

Varihesive® Hidrogel deverá ser mudado sempre que haja fugas de gel sob o apósito que cobre a lesão ou quando for removido nas mudanças de rotina do penso. Em qualquer dos casos, recomenda-se que o Varihesive® Hidrogel seja substituído com intervalos que não excedam três dias em lesões com esfacelos, tecido necrosado e sete dias no caso de lesões limpas com tecido de granulação.

Precauções e Observações

A colonização de feridas crónicas é normal e não constitui contra-indicação para a utilização deste gel. Pode utilizar-se em feridas infectadas, sob supervisão médica e com uma antibioterapia adequada. Este gel estimula o desbridamento autolítico, podendo por isso resultar, após as primeiras mudanças de penso, num aumento do tamanho da ferida. Em presença de infecção por anaeróbios, não deverá ser utilizado um penso oclusivo como penso secundário.

O tratamento de úlceras diabéticas deverá incluir o controlo da glicémia, como o alívio da pressão.

Varihesive® Hidrogel ao criar um meio húmido na lesão, contribui para o desbridamento autolítico e para a remoção do tecido necrosado, podendo por isso a lesão aumentar de tamanho após as primeiras mudas de penso.

Este produto é fornecido estéril. Se o tubo ou o aplicador estiverem deteriorados, não utilize.

Conservação:

Armazenar em local fresco e seco (10°C – 25°C)

Tubo esterilizado em autoclave. Aplicador esterilizado por óxido de etileno. Não reesterilize.

Miscelânea

O Varihesive® Hidrogel está aprovado para comercialização em toda a Europa com marcação CE, em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE do Conselho que regula os dispositivos médicos a nível europeu.

Apresentações

Apresentações	Capacidade	Unids./Emb.	REF	CNP	CDM
Bisnaga em tubo de alumínio	15g	cx 5	403700	6727800	15481972
Bisnaga em tubo de alumínio	15g	cx 10	401802	6717546	15481980

ConvaTec Limited,

Deeside, UK

®/™ são marcas de ConvaTec, Inc.

©2022

KVTECH PORTUGAL, Produtos Médicos Unipessoal, lda.

Avenida Duque de Loule, 106 – Piso 4

1050-093 Lisboa, Portugal

Tel: 707 201 187

email: convatec.pt@convatec.com

Matriculada no Registo Comercial de Lisboa

NICP: 508671531 | Capital social: 5.000,00 Euros.