

Descrição do produto

Actilite® é constituído por uma compressa de viscose impregnada com mel medicinal de Manuka Activon de grau clínico e com óleo de Manuka. O óleo de Manuka reforça as suas propriedades, tanto no que diz respeito à ação bactericida como ao efeito não-aderente do penso.

O mel medicinal de Manuka Activon é um mel de Manuka puro sem aditivos (100% mel).

O mel proveniente da planta Manuka tem demonstrado possuir propriedades antibacterianas únicas, não encontradas em nenhum outro mel proveniente de outras fontes florais, sendo eficaz contra um elevado número de bactérias.

Actilite® tem um nível de mel de Manuka Activon adequado à proteção da ferida, sendo o seu efeito antibacteriano marcadamente reforçado pela adição do óleo de Manuka.

Actilite® foi concebido para proteger a ferida, criar um ambiente húmido, promover a cicatrização e ao mesmo tempo permitir a passagem do exsudado.

Composição

Compressa de viscose impregnada com 99% de mel de grau clínico com ação bactericida – mel medicinal de Manuka Activon (sem aditivos) – e com 1% de óleo de Manuka.

Modo de aplicação

Aplicar Actilite à temperatura ambiente.

A escolha do penso deve ser de acordo com as dimensões da ferida. Actilite deve ser colocado diretamente no leito da ferida, de qualquer um dos lados. Actilite pode ser cortado para adaptar às dimensões da ferida.

Se necessário, cobrir com um penso secundário apropriado, película semipermeável ou penso absorvente.

Quando substituir

Dependendo de vários fatores, tais como os níveis de exsudado da ferida, o fluido intersticial circundante e o edema, o penso pode necessitar de ser substituído diariamente ou pode permanecer na ferida até 7 dias.

Apresentações

Medidas	Qtd./Emb.	Ref.
5 cm x 5 cm	10 pensos	CR4281
10 cm x 10 cm	10 pensos	CR3849
10 cm x 20 cm	10 pensos	CR3852
30 cm x 20 cm	10 pensos	CR4366
30 cm x 30 cm	5 pensos	CR4367
30 cm x 60 cm	5 pensos	CR4368



Propriedades

Ação bactericida de largo espectro

Efeito osmótico

Contém numerosos anti-oxidantes e agentes anti-inflamatórios

Ligeira ação desbridante

Combate eficazmente o mau odor das feridas (efeito desodorizante)

Fonte de nutrientes

Promove a cicatrização das feridas

Mantém o ambiente húmido necessário à cicatrização

Permite a passagem do exsudado

Não-aderente

Confortável e moldável ao formato da ferida

Destrói e impede a formação de biofilmes

Indicações

Actilite® pode ser utilizado em feridas não exsudativas e pouco exsudativas, especialmente em feridas infetadas ou em risco de ficarem infetadas, superficiais ou em fase de granulação, onde seja benéfico um penso que proporcione um marcado efeito antibacteriano. Tais como:

Feridas infetadas e feridas cirúrgicas

Feridas com mau odor

Úlceras de pressão

Úlceras de perna

Queimaduras

Cortes e abrasões

Escoriações

Locais de enxerto

Tumores proliferativos e ulcerativos

Advertências

Actilite® contém glucose. O mel não é absorvido pela corrente sanguínea e não existe evidência clínica que sugira que a utilização de Actilite® poderá aumentar os níveis de açúcar no sangue. Contudo, é aconselhável monitorizar os doentes com diabetes.