

Activon Tube®

Mel bactericida Tubo de 20g e 25g – Mel de Manuka a 100%

MEL BACTERICIDA
Mel de Manuka a 100%

Descrição do produto

Activon Tube® é um tubo com mel medicinal de Manuka Activon de grau clínico, com ação bactericida.

O mel medicinal de Manuka Activon é um mel de Manuka puro sem aditivos (100% mel).

O mel proveniente da planta Manuka tem demonstrado possuir propriedades antibacterianas únicas, não encontradas em nenhum outro mel proveniente de outras fontes florais, sendo eficaz contra um elevado número de bactérias. Este mel é eficaz contra um elevado número de bactérias, tanto gram+ como gram-, incluindo meticilina-resistentes e vancomicina-resistentes.

Activon Tube® foi concebido para proteger a ferida, criar um ambiente húmido, proporcionar o desbridamento de tecido fibrótico e necrótico, promover a cicatrização e, de um modo eficaz, eliminar o mau odor próprio de algumas feridas.

Composição

Tubo de plástico maleável com 100% de mel de grau clínico com ação bactericida – mel medicinal de Manuka Activon (sem aditivos).

Modo de aplicação

Aplicar Activon Tube® à temperatura ambiente:

- Rode a tampa até quebrar.
- Aplique Activon Tube®.
- Para guardar o restante, vire a tampa ao contrário e tape o tubo.
- Uma vez aberta a embalagem, esta pode ser utilizada até ao máximo de 90 dias.

Activon Tube pode ser aplicado:

- Diretamente na ferida,
- Impregnado em material de penso,
- Para adicionar maior quantidade de mel a outros pensos que já contêm mel,
- Para hidratar a pele seca, frágil e perilesional.

Quando substituir

Dependendo de vários fatores, tais como os níveis de exsudado da ferida, o fluido intersticial circundante e o edema, o penso pode necessitar de ser substituído diariamente ou pode permanecer na ferida até 7 dias.

Quando utilizado em feridas cavitárias, lavar com uma solução salina estéril de 0,9%.

Apresentações

Medidas	Qtd./Emb.	Ref.
Tubo 20 g	12 tubos	CR4493
Tubo 25 g	12 tubos	CR3830



Propriedades

Ação bactericida de largo espectro

Efeito osmótico:

Elevada pressão osmótica em feridas desbridadas ou com fibrina

Ação desbridante

Combate eficazmente o mau odor das feridas

(efeito desodorizante)

Contém numerosos anti-oxidantes e

agentes anti-inflamatórios

Fonte de nutrientes

Promove a cicatrização das feridas

Mantém o ambiente húmido necessário à cicatrização das feridas

Destrói e impede a formação de biofilmes

Indicações

Activon Tube® pode ser aplicado em todo o tipo de feridas, especialmente em feridas infetadas, superficiais ou em fase de granulação, em feridas profundas, exsudativas e necrosadas. Tais como:

Úlceras de pressão

Úlceras de perna

Úlceras diabéticas

Feridas infetadas e feridas cirúrgicas

Queimaduras

Feridas com mau odor

Feridas cavitárias e sinus

Seios perinasais

Feridas necróticas e com escaras

Locais de enxerto

Tumores proliferativos e ulcerativos

Advertências

Activon Tube® contém glucose. O mel não é absorvido pela corrente sanguínea e não existe evidência clínica que sugira que a utilização de Activon Tube® poderá aumentar os níveis de açúcar no sangue. Contudo, é aconselhável monitorizar os doentes com diabetes.

Dependendo do grau de sensibilidade local, poderá verificar-se alguma sensação de dor aquando da aplicação do Activon Tube®, devendo nestes casos ser considerada a terapêutica analgésica.